
CE 0318



INSTRUCCIONES DE USO: Fresa para Implantes

Realizar una inspección visual y rechazar cualquier instrumento que estuviera defectuoso.

La fresa se debe introducir en la boca del paciente con la turbina desconectada

Se deben evitar apalancamientos, bloqueos y altas temperaturas para evitar roturas.

La presión de trabajo y velocidad dependen de la dureza de la dentadura.

Se debe trabajar con la menor presión posible

A mayor velocidad, se debe ejercer menor presión. .

El rango de velocidad recomendado es de 100 r.p.m a 2000 r.p.m.en hueso

Cuando se opera con la herramienta, usar siempre irrigación con 50ml/min.

Si el diámetro es mayor de 3,1mm, irrigar con 150ml/min.

Se deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de la turbina

Comprobar embalaje

Ajustar el vástago a la turbina

La vida útil del producto es 5 años desde fecha de compra

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.-

Antes de la primera utilización y después de cada utilización :

deben realizarse los siguientes pasos:

Desinfectar mediante una solución a base de GLUTARALDEHIDO por inmersión al menos durante 30 minutos.

Esterilizar mediante un ciclo de autoclave a 134° C durante 18 minutos

El número máximo garantizado de ciclos de esterilización sin pérdida de funcionalidad es 10

Diabor, S.L. Ginzo de Limia, 53-Tel. 91 730 47 34-28034 - Madrid

Texto revisado: 14/07/2016
